

CT-6 Kullanım Klavuzu



• Kırık - çatlak teşhisini yapın (şiddetli ağrı, deformasyon, hızlı şişme ve yaralı ekstremitenin diğerinden daha kısa olması)

• Kan dolaşımının düzeyini kontrol edin
Eğer traksiyon gerekiyorsa aşağıdaki adımları uygulayınız:

A) Çantadan çıkarıp tüm parçaları kontrol edin

Bilek kelepçesi
Kasık bandı
Bacak bantları
Ayar sistemli atel

B) Resim 1 de gösterildiği şekilde yaralının yanına serin

C) Uygun atel boyunu ayarlayın. Atelin üst ucu pelvisin üst ucuna denk alt ucu ise ayağın bitiminden 20 cm uzak olmalıdır.

D) Bacak bantlarını yaralının altından geçirin.

E) Kasık bandını bacağın etrasından geçirin ve uçlarını birleştirin.

F) Bilek kelepçesini uygulayın. Ayak ile kanca arasındaki mesafeyi minimuma indirecek şekilde bağlantı ipini ayarlayın.

G) Ateli sabitlemek için bacak bantlarını yapıştırın 2 adedi diz üstü 2 adedi diz altına gelecek şekilde yerleştirin.

H) Traksiyon sistemini bilek kelepçesine takınız.

I) Kan dolaşımını kontrol ediniz.

J) Hastanın konforunu artıracak uygun traksiyonu uygulayınız.

K) Uygulanacak traksiyon miktarını belirlemek için yaralı olmayan ekstremiteyi ölçü olarak alınız.

L) Nakliye sırasında ihtiyaç duyulduğunda traksiyonu yineleyiniz.

M) Kandolaşımını kontrol ediniz.